

Einrichtung ACUSON NX2/NX3 für sonoGDT

- Taste Voreinstellungen (in der obersten Tastaturreihe)
- Menüpunkt Speichertasten (linkes oberes Drittel, Maustaste ist Taste SET links vom Trackball)
- Unten im Text Punkt bei Taste END, **Studie schließen und Einstellungen neu laden** setzen
- Menüpunkt Netzwerkexport anklicken (unten links)
- Neben Host auf Neu klicken
- Alias: **NX**
- AE Title: **NX**
- Host name: **NX**
- **Statische IP (manuell) markieren**
- IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
- Subnetzmaske: **Subnetzmaske des Servers**
- Standardgateway: **Gateway-IP**
- Mediatype: **Hardware Vorgabe**
- Duplex-Mode: **Hardware Vorgabe**
- OK anklicken, anschließend Speichern (rechts unten)
- System neu starten

- Taste Voreinstellungen (in der obersten Tastaturreihe)
- Links im Menü DICOM anklicken
- Karteireiter Speicherserver
- Neu anklicken
- Alias: **sonoGDT**
- AE-Title: **sonoGDT**
- IP-Adresse: **IP des Servers**
- Port-Nr.: **105**
- Ping zum Test der Netzwerkverbindung
- Echo zum Test der DICOM-Verbindung anklicken
- Anwenden anklicken
- Autospeichern zu DICOM: **Ja**
- Nach jedem Bild speichern: **Ja**
- Bildformat: **Automatik**
- SR senden: **Ja**
- No Monochrome Conversion: **Ja**
- Speichern anklicken

- Karteireiter Arbeitsliste Server
- Neu anklicken
- Alias: **Worklist**
- AE-Title: **US01**
- IP-Adresse: **IP des Servers**
- Port-Nr.: **104**
- Ping zum Test der Netzwerkverbindung
- Echo zum Test der DICOM-Verbindung anklicken
- Anwenden anklicken
- Streamlined Suche (Haken setzen)
- Strict Verification (Haken setzen)

- Speichern anklicken