

Einrichtung ACUSON NX3/NX2 Netzwerkexport für sonoGDT

- Taste Voreinstellungen (in der obersten Tastaturreihe)
 - Menüpunkt Speichertasten (linkes oberes Drittel, Maustaste ist Taste SET links vom Trackball)
 - Unten im Text Punkt bei Taste END, **Studie schließen und Einstellungen neu laden** setzen
 - Menüpunkt Netzwerkexport anklicken (unten links)
 - Neben Host auf Neu klicken
 - Alias: **NX**
 - AE Title: **NX**
 - Host name: **NX**
 - **Statische IP (manuell) markieren**
 - IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
 - Subnetzmaske: **Subnetzmaske des Servers**
 - Standardgateway: **Gateway-IP**
 - Mediatype: **Hardware Vorgabe**
 - Duplex-Mode: **Hardware Vorgabe**
 - OK anklicken, anschließend Speichern (rechts unten)
 - System neu starten
-
- Taste Voreinstellungen (in der obersten Tastaturreihe)
 - Menüpunkt Netzwerkexport anklicken (Maustaste ist die Taste SET links vom Trackball)
 - Netzwerkstatus anzeigen: **Haken setzen**
 - Autospeichern ins Netzwerk: **Haken setzen**
 - Altes Format: **Punkt setzen**
 - Neben Export Host auf Neu klicken
 - Alias: **Server**
 - IP-Adresse: **IP des Servers**
 - Ping anklicken zum Test der Netzwerkverbindung
 - Gemeinsamer Ordner: **sonoGDT\STMP\$** (die \ - Taste ist direkt über der ENTER-Taste)
 - Account: **Windows-Benutzername**
 - Kennwort: **in der Praxis erfragen** (Groß-/Kleinschreibung beachten)
 - Test Schreib anklicken zum Test der Schreibberechtigungen in die Freigabe
 - OK zum Schließen des Dialogs