

Konfiguration Acuson Redwood mit DICOM

- Auf dem Touchscreen unten links das **Symbol mit den 9 Punkten** antippen
 - auf die Kachel **Konfiguration** (mit Zahnradsymbol) tippen
 - am Monitor **Konnektivität & Netzwerk** anklicken Hinweis: (Maustasten sind die großen Tasten neben dem Trackball)
 - auf **Netzwerkkonfiguration** klicken
 - oben auf **Lokaler Host** klicken
 - Verbindungstyp **Verkabelt** auswählen
 - **Statische IP-Adresse** auswählen
 - Alias: **Redwood**
 - AE-Title: **Redwood**
 - Hostname: **Redwood**
 - IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
 - Subnetz-Maske: **Subnetzmaske des Servers**
 - Standard-Gateway: **Gateway-IP**
 - unten rechts auf **Schließen** klicken
 - System neu starten
-
- Auf dem Touchscreen unten links das **Symbol mit den 9 Punkten** antippen
 - auf die Kachel **Konfiguration** (mit Zahnradsymbol) tippen
 - am Monitor **Konnektivität & Netzwerk** anklicken
 - auf **DICOM-Konfiguration** klicken
 - Karteireiter **Speicherserver**
 - **Hinzufügen** anklicken
 - Alias: **sonoGDT**
 - AE-Title: **sonoGDT**
 - IP-Adresse: **IP des Servers**
 - Portnr.: **105**
 - alle anderen Einstellungen belassen, **Anwenden** anklicken
 - den Haken vor dem Eintrag **sonoGDT** setzen
 - **Auto-Speichern auf DICOM** markieren
 - den Punkt setzen **Bei Untersuchung speichern**
-
- Karteireiter **Arbeitslistenserver**
 - **Hinzufügen** anklicken
 - Alias: **Worklist**
 - AE-Title: **US01**
 - IP-Adresse: **IP des Servers**
 - Portnr.: **104**
 - alle anderen Einstellungen belassen, **Anwenden** anklicken
 - Haken setzen bei **Arbeitsliste im Hintergrund aktualisieren**
 - **Abfrageintervall** auf 3 min einstellen
-
- unten rechts auf **Schließen** klicken