

## Einrichtung ACUSON S1000, S2000, S3000 für sonoGDT

- Taste **VOREINSTELLUNGEN** (oberste Tastaturreihe)
- Menüpunkt **DICOM KONFIGURATION** anklicken (Maustaste ist die Taste SET links vom Trackball)
- Karteireiter **LOCAL HOST**
- DHCP VERWENDEN** (Haken entfernen)
- IP-ADRESSE:** **IP\_ULTRASCHALLGERÄT**
- SUBNETZMASKE:** **SUBNETZMASKE**
- STANDARDGATEWAY:** **GATEWAY**
- LOKALER AE-TITLE:** (kann unverändert bleiben)
- WINS UND DNS:** (nichts verändern)
- AKTIVIEREN** anklicken (Neustart erfolgt später)
  
- Karteireiter **SPEICHERSERVER**
- NEU** anklicken
- ALIAS** **sonoGDT**
- IP-ADRESSE:** **IP\_SERVER**
- PING** anklicken (es sollte eine Meldung über erfolgreichen Verbindungsaufbau erscheinen, sonst Kabel prüfen!)
- AE TITLE:** **sonoGDT**
- PORT-NR.** **105**
- C-ECHO** anklicken, GDT-Server auf der Gegenseite muss eingeschaltet sein! Wenn kein Erfolg, Einstellungen der Firewall am Server prüfen und ggf. Port 105 freigeben)
- AKTIVIEREN** anklicken
- links unter der Liste der Speicherserver **SPEICHERN** anklicken (nicht verwechseln mit ganz unten links!)
  
- Karteireiter **HIS/RIS**
- NEU** anklicken
- ALIAS** **Worklist**
- IP-ADRESSE:** **IP\_SERVER**
- PING** anklicken (es sollte eine Meldung über erfolgreichen Verbindungsaufbau erscheinen, sonst Kabel prüfen!)
- AE TITLE:** **US01** (U S Null Eins, Großschreibung beachten, kein anderer!)
- PORT-NR.** **104**
- C-ECHO** anklicken, in sonoGDT muss der Punkt bei Worklist-Eintrag bereitstellen gesetzt sein! Wenn kein Erfolg, Einstellungen der Firewall am Server prüfen und ggf. Port 104 freigeben)
- SERVICES:** Haken setzen bei Basic Worklist (nicht bei Performed Procedure Step)
- AKTIVIEREN** anklicken
- links unter der Liste der HIS/RIS **SPEICHERN** anklicken (nicht verwechseln mit ganz unten links!)
- System neu starten (Ausschalter drücken, im Menü Neustart wählen)
  
- Nach Neustart wieder Taste **VOREINSTELLUNGEN**
- links im Menü **DRUCKEN/SPEICHERN** auswählen
- Für sonoGDT Autotransfer für Bilder und Clips auf **WÄHREND DER UNTERSUCHUNG** stellen, für Volumendaten deaktivieren
- SPEICHERN** (unten links)