

Einrichtung ACUSON X150 für sonoGDT

- Taste **VOREINSTELLUNGEN** (6. Taste in der obersten Tastaturreihe)
- Menüpunkt **SPEICHERTASTEN** (linkes oberes Drittel, Maustaste ist die Taste SET links vom Trackball)
- unten im Text Punkt bei **TASTE NEU, Studie schließen und Einstellungen neu laden** setzen
- Menüpunkt **NETZWERKEXPOR** anklicken (unten links)
- Neben **HOST** auf **NEU** klicken
- ALIAS** **X150**
- AE TITLE:** **X150**
- HOST NAME:** **X150**
- DHCP VERWENDEN** (Haken entfernen)
- IP-ADRESSE:** **IP_ULTRASCHALLGERÄT**
- SUBNETZMASKE:** **SUBNETZMASKE**
- STANDARDGATEWAY:** **GATEWAY**
- MEDIATYPE:** **Hardware Vorgabe**
- DUPLEX-MODE:** **Hardware Vorgabe**
- OK** anklicken, anschließend **SPEICHERN** (rechts unten)
- System neu starten (Netzschalter links über Tastatur, im Menü **HERUNTERFAHREN** wählen. Falls kein Menü erscheint, etwas warten). Nach dem Abschalten das System neu starten.

- Taste **VOREINSTELLUNGEN** (5. Taste in der obersten Tastaturreihe)
- Menüpunkt **NETZWERKEXPOR** anklicken (unten links, Maustaste ist die Taste SET links vom Trackball)
- Haken bei **NETZWERKSTATUS ANZEIGEN: Haken setzen**
- Haken bei **AUTOSPEICHERN INS NETZWERK Haken setzen**
- VERMÄCHTNIS EXPORTIEREN Punkt setzen**
- Neben **EXPORT HOST** auf **NEU** klicken
- ALIAS:** **Server**
- IP-ADRESSE:** **IP_SERVER**
- PING** anklicken (es sollte eine Meldung über erfolgreichen Verbindungsaufbau erscheinen, sonst Kabel prüfen!)
- GEMEINSAMER ORDNER:** **sonoGDT\ \$TMP\$** (Hinweis: die Backslashtaste ist direkt über der ENTER-Taste)
- ACCOUNT:** **BENUTZERNAME** (Groß-/Kleinschreibung beachten)
- KENNWORT:** **PASSWORD** (Groß-/Kleinschreibung beachten)
- TEST SCHREIB** anklicken (wenn nicht erfolgreich, Freigabeberechtigungen, Nutzernamen und Passwort auf dem Server und in den Eingaben prüfen)
- OK** zum Schließen des Dialogs