

Einrichtung ACUSON X300 PE für sonoGDT

- Taste **VOREINSTELLUNGEN** (5. Taste in der obersten Tastaturreihe)
 - Menüpunkt **SPEICHERTASTEN** (linkes oberes Drittel, Maustaste ist die Taste SET links vom Trackball)
 - unten im Text Punkt bei **TASTE NEU**, **Studie schließen und Einstellungen neu laden** setzen
 - Menüpunkt **NETZWERKEXPOR**T anklicken
 - Neben **HOST** auf **NEU** klicken
 - ALIAS** **X300**
 - AE TITLE:** **X300**
 - HOST NAME:** **X300**
 - DHCP VERWENDEN** (Haken entfernen)
 - IP-ADRESSE:** **IP_ULTRASCHALLGERÄT**
 - SUBNETZMASKE:** **SUBNETZMASKE**
 - STANDARDGATEWAY:** **GATEWAY**
 - MEDIATYPE:** **Hardware Vorgabe**
 - DUPLEX-MODE:** **Hardware Vorgabe**
 - OK** anklicken, anschließend **SPEICHERN** (rechts unten)
 - System neu starten (Netzschalter hinten links, im Menü **NEUSTART** wählen . Falls kein Menü erscheint, etwas warten)
-
- Taste **VOREINSTELLUNGEN** (5. Taste in der obersten Tastaturreihe)
 - Menüpunkt **NETZWERKEXPOR**T anklicken
 - NETZWERKSTATUS ANZEIGEN:** **Haken setzen**
 - AUTOSPEICHERN INS NETZWERK:** **Haken setzen**
 - ALTES FORMAT:** **Punkt setzen**
 - Neben **EXPORT HOST** auf **NEU** klicken
 - ALIAS:** **Server**
 - IP-ADRESSE:** **IP_SERVER**
 - PING** anklicken (es sollte eine Meldung über erfolgreichen Verbindungsaufbau erscheinen, sonst Kabel prüfen!)
 - GEMEINSAMER ORDNER:** **sonoGDT\%TMP%** (Hinweis: die Backslashtaste ist direkt über der ENTER-Taste, %-Taste = SHIFT+4)
 - ACCOUNT:** **BENUTZERNAME** (Groß-/Kleinschreibung beachten)
 - KENNWORT:** **PASSWORT** (Groß-/Kleinschreibung beachten)
 - TEST SCHREIB** anklicken (wenn nicht erfolgreich, Freigabeberechtigungen, Nutzernamen und Passwort auf dem Server und in den Eingaben prüfen)
 - OK** zum Schließen des Dialogs