

Einrichtung Sonoline G40 für sonoGDT

- Taste **VOREINSTELLUNGEN** (5. Taste in der obersten Tastaturreihe)
 - Menüpunkt **NETZWERKEXP** anklicken
 - Neben **HOST** auf **NEU** klicken
 - ALIAS** G 4 0
 - AE TITLE:** G 4 0
 - HOST NAME:** G 4 0
 - DHCP VERWENDEN** (Haken entfernen)
 - IP-ADRESSE:** IP_ULTRASCHALLGERÄT
 - SUBNETZMASKE:** SUBNETZMASKE
 - STANDARDGATEWAY:** GATEWAY
 - MEDIATYPE:** Hardware Vorgabe
 - DUPLEX-MODE:** Hardware Vorgabe
 - OK** anklicken, anschließend **SPEICHERN** (rechts unten)
 - System neu starten (Netzschalter hinten links, im Menü **NEUSTART** wählen . Falls kein Menü erscheint, etwas warten)
-
- Taste **VOREINSTELLUNGEN** (5. Taste in der obersten Tastaturreihe)
 - Menüpunkt **DICOM** anklicken
 - ALIAS:** sonoGDT
 - AE-TITLE:** sonoGDT
 - IP-ADRESSE:** IP_SERVER
 - PORT-NR.:** 105
 - PING** anklicken (wenn kein Erfolg, Netzwerkverbindungen prüfen)
 - ECHO** anklicken (Wenn kein Erfolg, prüfen ob sonoGDT gestartet und mit dem Haken unten links eingeschaltet ist, Einstellungen der Firewall am Server prüfen, ggf. Port 105 freigeben)
 - Den Rest der Einstellungen belassen
 - OK**
 - Unter **SPEICHER-SERVER** bei **AUTOSPEICHERN ZU DICOM** den **Haken setzen**
 - Daneben den **Punkt setzen** bei **SPEICHERN WÄHREND DER UNTERSUCHUNG**
-
- Links im Menü **DICOM** anklicken
 - Neben Arbeitsliste-Server auf **NEU** klicken
 - ALIAS:** Worklist
 - AE-TITLE:** US01
 - IP-ADRESSE:** IP_SERVER
 - PORT-NR.:** 104
 - PING** anklicken (wenn kein Erfolg, Netzwerkverbindungen prüfen)
 - ECHO** anklicken (Worklistserver auf der Gegenseite muss eingeschaltet sein! Wenn kein Erfolg, Einstellungen der Firewall am Server prüfen und ggf. Port 104 freigeben)
 - OK**
 - Unter **ARBEITSLISTE-SERVER** bei **STREAMLINED SUCHE** den **Haken setzen**
 - Ganz rechts unten mit **SPEICHERN** die Konfiguration verlassen.