

Konfiguration für Vinno Ultraschallsysteme mit DICOM

- **Systemeinstellungen aufrufen**
- Menüpunkt **Netzwerk**
- **Automatische Konfiguration der IP Adresse:** deaktiviert
- **IPv4 Einstellungen:** IP des US-Gerätes
- **Subnetzmaske:** Subnetzmaske des Servers
- **Standardgateway:** Gateway-IP
- **Speichern** (Disketten Symbol oben rechts auf dem Bildschirm)

- Menüpunkt **DICOM**
- Karteireiter **Allgemein**
- **DICOM Dateiformat:** BMP
- **DICOM Kompressionsmodus:** Volle Kompatibilität
- **DICOM default encoding:** ISO_IR 192
- **DICOM Merge serieses:** deaktiviert
- **Format des Patientennamens:** Name Vorname
- **Bildrate:** Voreinstellung
- **Lokaler AET:** Vinno
- **Lokale Adresse:** IP des US-Gerätes
- **Speichern** (Disketten Symbol oben rechts auf dem Bildschirm)

- Menüpunkt **DICOM**
- Karteireiter **Speicher**
- **DICOM Speicherung** aktivieren
- **Storage SCP AET:** sonoGDT
- **Adresse SCP Speicherung:** IP des Servers
- **Storage SCP Port** 105
- **Aktivieren sie die Speicherbestätigung:** deaktiviert
- **Abfrage aktivieren:** deaktiviert
- **Abrufen aktivieren:** deaktiviert
- **Strukturbericht aktivieren:** deaktiviert
- Einstellungen im Bereich **Liste** belassen
- **Speichern** (Disketten Symbol oben rechts auf dem Bildschirm)

- Menüpunkt **DICOM**
- Karteireiter **Arbeitsliste**
- **DICOM Arbeitsliste** aktivieren
- **Worklist SCP AET:** US01
- **Worklist SCP Adresse:** IP des Servers
- **Worklist SCP Port:** 104
- **Lokalen AET angeben:** deaktiviert
- **Datumsformat erzwingen:** deaktivieren
- **Arbeitsliste automatisch laden:** aktiviert
- **Patientennamen für die Abfrage in double-byte wandeln:** deaktiviert

- **Endabfrage bei Sequenzende:** deaktiviert
- **Untersuchungsbericht:** StudyDescription
- **Speichern** (Disketten Symbol oben rechts auf dem Bildschirm)

- Menüpunkt **Erweiterte Taste**
- in der Zeile **Speichern auf Festplatte:** ganz rechts auf **Details** tippen
- unter **Details:**
- **Speicherziel:** DICOM Speicher Server
- Auswahl unter **Liste:** Liste 1
- **Dateiformat:** DICOM
- **Speichermodus:** Ein-Key-Speicherung
- **Speichern eines Einzelbildes:** Deaktiviert
- **Patienteninfo einschließen:** Aktiviert
- **Krankenhausinformation inkludiert:** Aktiviert
- **Datensicherung wurde auf dem System gespeichert:** VRD
- **Automatische Datenübertragung nach Abschluss der Untersuchung:** Aktiviert
- **Speichern** (Disketten Symbol oben rechts auf dem Bildschirm)

- Menüpunkt **Erweiterte Taste**
- **Speichern auf Festplatte:** Speichern von DICOM zu DICOM...
- **Speichern** (Disketten Symbol oben rechts auf dem Bildschirm)
- **Menü schließen** (Symbol "X" oben rechts auf dem Bildschirm)