

## Konfiguration für Vinno Ultraschallsysteme mit DICOM

- **Systemeinstellungen aufrufen**
- Menüpunkt **Netzwerk**
- **Automatische Konfiguration der IP Adresse:** deaktiviert
- **IPv4 Einstellungen:** \$USIP\$
- **Subnetzmaske:** \$SUBNETZMASKE\$
- **Standardgateway:** \$GATEWAY\$
- **Speichern** (Disketten Symbol oben rechts auf dem Bildschirm)
  
- Menüpunkt **Erweiterte Taste**
- **Speichern auf Festplatte:** Speicher von DICOM zu DICOM
- unter **Details:**
- **Speicherziel:** DICOM Speicher Server
- **Dateiformat:** DICOM
- **Speichermodus:** Ein-Key-Speicherung
- **Speichern eines Einzelbildes:** Deaktiviert
- **Patienteninfo einschließen:** Aktiviert
- **Krankenhausinformation inkludiert:** Aktiviert
- **Datensicherung wurde auf dem System gespeichert:** VRD
- **Automatische Datenübertragung nach Abschluss der Untersuchung:** Aktiviert
- **Speichern** (Disketten Symbol oben rechts auf dem Bildschirm)
  
- Menüpunkt **DICOM**
- Karteireiter **Allgemein**
- **DICOM Dateiformat:** BMP
- **DICOM Kompressionsmodus:** Volle Kompatibilität
- **DICOM default encoding:** ISO\_IR 192
- **DICOM Merge serieses:** deaktiviert
- **Format des Patientennamens:** Name Vorname
- **Bildrate:** Voreinstellung
- **Lokaler AET:** Vinno
- **Lokale Adresse:** \$USIP\$
- **Speichern** (Disketten Symbol oben rechts auf dem Bildschirm)
  
- Menüpunkt **DICOM**
- Karteireiter **Speicher**
- **Storage SCP AET:** sonoGDT
- **Adresse SCP Speicherung:** \$SERVERIP\$
- **Storage SCP Port** \$PORTSTORAGE\$
- **Aktivieren sie die Speicherbestätigung:** deaktiviert
- **Abfrage aktivieren:** deaktiviert
- **Abrufen aktivieren:** deaktiviert
- **Strukturbericht aktivieren:** deaktiviert
- **Speichern** (Disketten Symbol oben rechts auf dem Bildschirm)

- Menüpunkt **DICOM**
- Karteireiter **Arbeitsliste**
- **Worklist SCP AET:** US01
- **Worklist SCP Adresse:** \$SERVERIP\$
- **Worklist SCP Port:** \$PORTWL\$
- **Lokalen AET angeben:** deaktiviert
- **Datumsformat erzwingen:** deaktivieren
- **Arbeitsliste automatisch laden:** aktiviert
- **Patientennamen für die Abfrage in double-byte wandeln:** deaktiviert
- **Endabfrage bei Sequenzende:** deaktiviert
- **Untersuchungsbericht:** StudyDescription
- **Speichern** (Disketten Symbol oben rechts auf dem Bildschirm)
- **Menü schließen** (Symbol "X" oben rechts auf dem Bildschirm)