


sonoGDT, Update auf Windows 10

Vor einem Windows 10 Update des Servers, auf dem sonoGDT installiert ist, muss der sonoGDT-Lizenzkey aus- und nach dem Update wieder eingespielt werden, da das Update als Hardwareänderung wahrgenommen wird. Sollten Sie nur die Client-PC's updaten, sind diese Schritte nicht erforderlich, da die Lizenz ausschließlich auf dem Server aktiviert ist.

1. Starten Sie **sonoGDT Diagnose** am Server (Icon auf dem Desktop)
2. Beenden Sie den laufenden sonoGDT-Dienst (bzw. die laufende Anwendung) über die zugehörige Schaltfläche rechts oben in **sonoGDT Diagnose**
3. Beenden Sie sonoGDT Diagnose
4. Laden und installieren Sie das sonoGDT-Update im Downloadbereich der Webseite <http://www.sonoGDT.de>
Dies ist notwendig, da ältere Versionen die Möglichkeit zum Zurückspielen der Lizenz nicht anbieten.
5. Starten Sie **sonoGDT Diagnose** nach dem sonoGDT-Update (und vor dem Windows 10 Update!) erneut
6. Klicken Sie **mit gedrückter CTRL-Taste (!)** auf die Schaltfläche **Lizenzmanagement**.

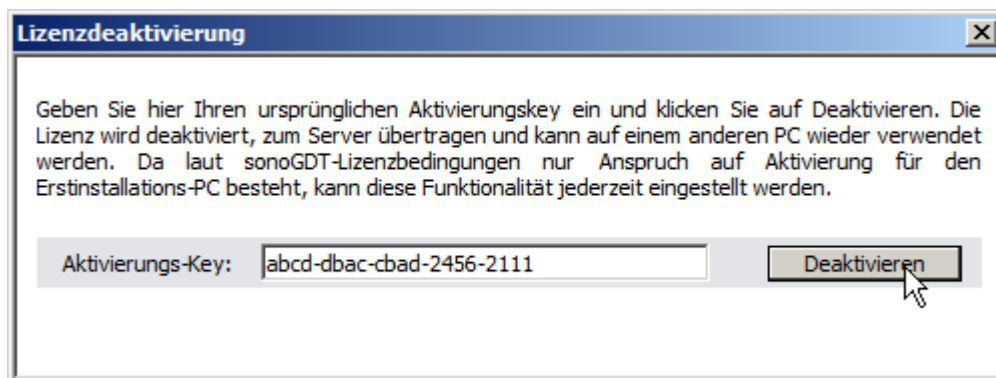

7. Geben Sie Ihren ursprünglichen Lizenzkey ein und klicken Sie auf Deaktivieren. Der Key wird an diesem PC deaktiviert und zurück auf den Aktivierungsserver gespielt. Sollte Ihnen Ihr Lizenzkey nicht vorliegen, erfragen Sie diesen bitte bei Ihrem Vertriebspartner, von dem Sie sonoGDT erworben haben.
8. Führen Sie Ihr Update auf Windows 10 durch.
9. Nachdem alle mit dem Update verbundenen Änderungen vorgenommen wurden, dies betrifft auch eventuell gleichzeitig vorgenommene Hardwareaufrüstungen oder Bios-Updates, starten Sie **sonoGDT Diagnose** erneut.
10. Aktivieren Sie sonoGDT über die Schaltfläche **Lizenzmanagement** (diesmal ohne gedrückte CTRL-Taste!)
11. Starten Sie nach der Aktivierung sonoGDT über die Schaltfläche rechts oben, wählen Sie dabei als Starttyp zunächst **als Anwendung**, dies stellt sicher, dass Sie eventuelle Fehlermeldungen oder Rückfragen der Firewall sehen und bestätigen können.
12. Wenn sonoGDT als Anwendung normal startet, beenden Sie die Anwendung über die gleiche Schaltfläche wieder, markieren als Starttyp nun **Hintergrunddienst (Autostart)** und starten den Dienst über die gleiche Schaltfläche.
13. Die Systemstatusanzeige sollte sinngemäß anzeigen, dass der Dienst gestartet ist und die Erreichbarkeit von GDT-Ordner, Bildarchiv-Ordner und Studien-Ordner gewährleistet ist.
14. Beenden Sie sonoGDT Diagnose, das Programm arbeitet nun wieder im Hintergrund.