


## WordConnect für sonoGDT

Ab Version 24.0.0 können Sie WordConnect ohne den Umweg über den GDTViewer direkt aus Ihrer Arztsoftware aufrufen, sofern Sie Messwerte des aktuellen Untersuchungstages verwenden wollen.

Bisher haben Sie dazu den GDTViewer zur Bildanzeige gestartet, die gewünschte Messwertdatei markiert und über das Kontextmenü (oder ein Tastenkürzel) Ihre gewünschte Vorlage gewählt. Ihr Befundtext wurde dadurch samt Messwerten in die Windows-Zwischenablage übernommen.

In den meisten Fällen sollen die Messwerte des aktuellen Untersuchungstages verwendet werden, dafür lässt sich ab WordConnect 24.0.0 ein direkter GDT-Aufruf einrichten. Je nach Arztsoftware öffnet sich dann über eine Schaltfläche oder einen Befehlsaufruf ein kleines Fenster mit Ihren vorkonfigurierten Vorlagen.

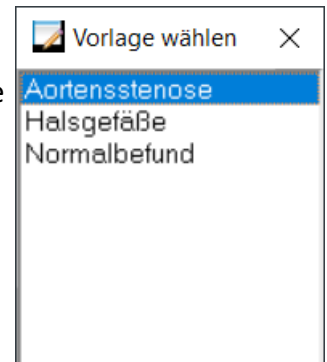

Ein Doppelklick auf die gewünschte Vorlage schließt dieses Fenster und Ihr Befundtext befindet sich sofort inkl. Messwerten in der Windows-Zwischenablage. Falls gewünscht, können Sie auch für jede Vorlage einen eigenen Befehlsaufruf einrichten, so dass auch die Anzeige des Auswahlfensters entfällt.

## Einrichtung der Praxissoftware

Legen Sie in WordConnect fest, wo Ihre Arztsoftware die GDT-Datei mit den Patientendaten ablegt.



Der Pfad muss sich lokal auf Ihrem Arbeitsplatz befinden, damit mehrere Anwender ungestört parallel arbeiten können. Ohne Angaben wird **C:\GDT\wordedv1.gdt** als Dateiname angenommen.

Richten Sie in Ihrer Praxissoftware einen GDT-Aufruf ein. Dieser muss die soeben oben festgelegte GDT-Datei (**C:\GDT\wordedv1.gdt**) mit der Satzart 6302 schreiben und danach WordConnect über den Serverpfad starten, z.B.

## \\Server\sonoGDT\WordConnect\WordConnect.exe

Als Parameter übergeben Sie wahlweise:

<b>/select=*</b>	öffnet die oben beschriebene Vorlagen-Auswahlliste
<b>/select="Normalbefund"</b>	verwendet ohne Auswahlfenster sofort die Vorlage Normalbefund
<b>/select=word</b>	stellt die Messwerte zum Ersetzen von Platzhaltern in Word bereit
<b>/replace</b>	Aktiviert für 20 Sekunden einen Hotkey. Sie können nun beliebigen Text in Ihrer Arztsoftware markieren und mit Shift+0 werden alle Platzhalter in diesem Text ersetzt. Diese Funktion ist nützlich, falls Sie Ihren Befundtext erst nach der Untersuchung variabel erstellen.

Auf Wunsch übernehmen wir die GDT-Einrichtung für Sie gegen Berechnung des Aufwandes.