


Syntax für das Erstellen von bedingten Textbausteinen mit der Erweiterung WordConnect Plus


Mit der Erweiterung WordConnect Plus können Sie Platzhalter erstellen, die später in Abhängigkeit vom gemessenen Wert unterschiedliche Textbausteine generieren. Ob die Erweiterung bei Ihnen aktiviert ist, erkennen Sie in der Kopfzeile des WordConnect-Fensters oder im Lizenzmanagement.

Folgendes Beispiel erläutert die Verwendung:


Auf dem Karteireiter **Befundvorlagen** markieren Sie rechts Ihre Vorlage in der Vorlagenliste, klicken dann auf **Bearbeiten**, anschließend mit der **rechten Maustaste** auf das Kürzel, für das Sie Bedingungen konfigurieren möchten.

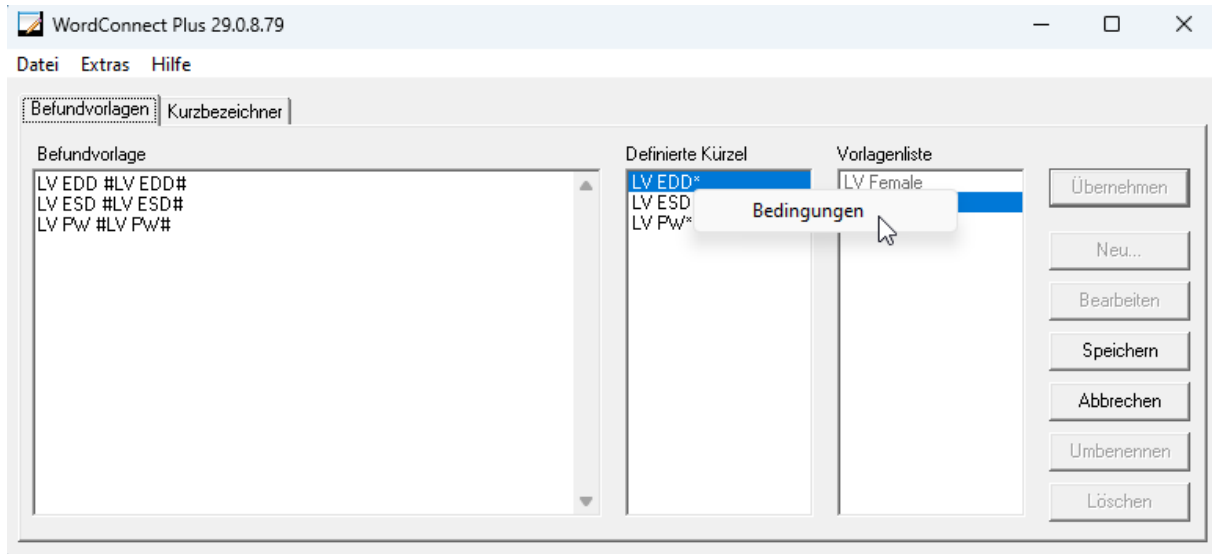

Mit Klick auf **Bedingungen** können Sie diese für die aktuelle Vorlage (hier LV Male) und das gewählte Kürzel (hier LV EDD) bearbeiten.

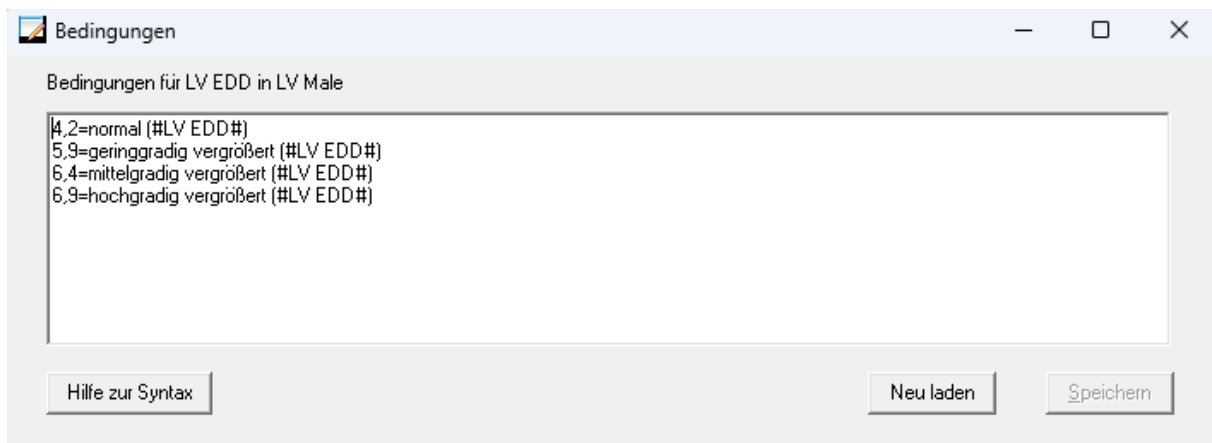

Kürzel, für die eine Bedingung hinterlegt wurde, werden in der Auflistung durch einen * gekennzeichnet.

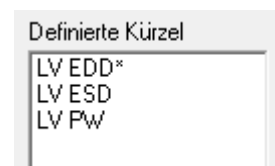

Im Beispiel wurde für den Linken Ventrikel für männliche Patienten folgende Bedingung definiert:

4,2=normal (#LV EDD#)

5,9=geringgradig vergrößert (#LV EDD#)

6,4=mittelgradig vergrößert (#LV EDD#)


6,9=hochgradig vergrößert (#LV EDD#)

Dies bedeutet für eine gemessene EDD von **6,5 cm**, dass der Text hinter **6,4=** ausgegeben wird, da sich der Wert zwischen **6,4** und der nächsten definierten Schwelle von **6,9** befindet.

Das Gleichheitszeichen trennt immer den Bedingungswert vom gewünschten Bedingungstext. Da das Kürzel in Ihrer Vorlage vollständig durch diesen Bedingungstext ersetzt wird, müssen Sie das Kürzel ebenfalls in den Bedingungstext aufnehmen, sofern Sie den Messwert mit ausgeben möchten, unsere Bedingung

6,4=mittelgradig vergrößert (#LV EDD#) ergibt somit **mittelgradig vergrößert (6,5 cm)**

Wenn nun für alle 3 Kürzel entsprechende Bedingungen definiert wurden, sehen Sie den Ergebnistext im WordConnect Plus Fenster:

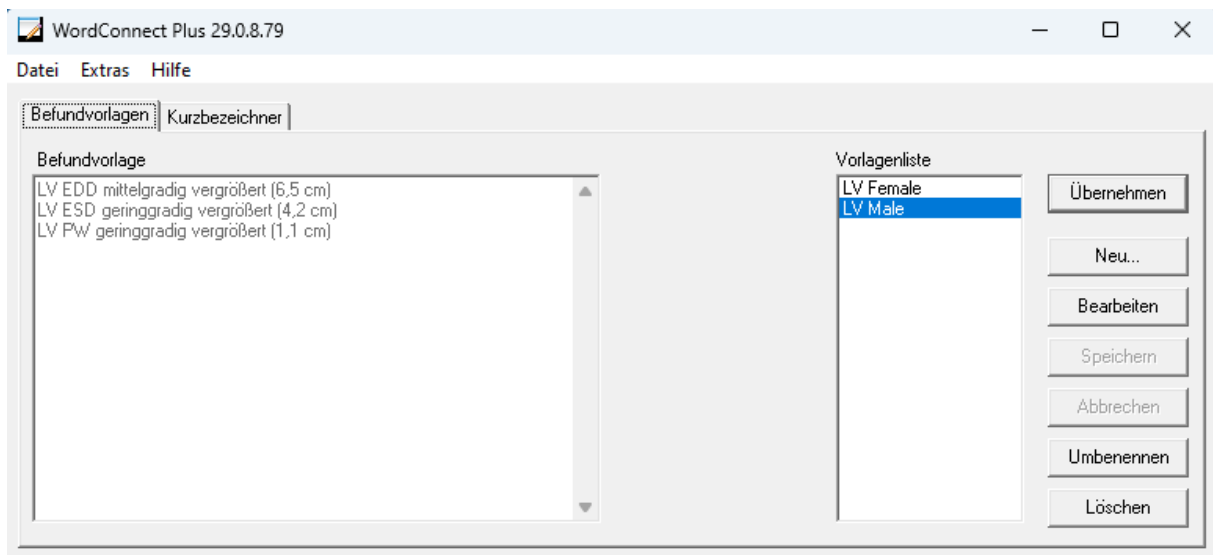

WordConnect Plus ist verfügbar ab sonoGDT Version 29.0 und ist eine kostenpflichtige Erweiterung von WordConnect.

Sollten Sie bereits Anwender von WordConnect sein, können Sie gern per Mail an info@sonoGDT.de ein Preisangebot und einen Demo-Key anfordern, der Ihre Installation zum Testen für 30 Tage auf WordConnect Plus erweitert.