


## Ändern des Speicherortes der Bilder in sonoGDT

Starten Sie am Server das Programm sonoGDT\_Diagnose, beenden Sie darin den sonoGDT-Dienst und starten Sie die Anwendung.


sonoGDT 19.6.0.0, sonoGDT\_Diagnose 16.5.3.0, GDTViewer 13.0.0.1  
Diagnose wurde gestartet von \\SONOGDT  
Installationsordner: D:\Programme\sonoGDT  
UNC-Pfad zu sonoGDT \\SONOGDT\sonoGDT  
Bildarchiv: \\sonoGDT\sonoGDT\Bildarchiv  
GDT-Ordner: C:\GDT\_sonoGDT  
Ultraschallsystem in studies : Alpinion - Netzwerkexport  
-----Systemstatus-----  
sonoGDT Dienst gestartet  
Erstelle Testdateien, bitte warten...  
GDT-Ordner: OK  
Bildarchiv-Ordner: OK  
Studien-Ordner: OK

Ändern Sie in der Anwendung den Pfad für den Bildspeicherort, verwenden Sie hier einen UNC-Pfad, damit jeder Arbeitsplatz diesen Ordner unter der gleichen Bezeichnung erreicht!

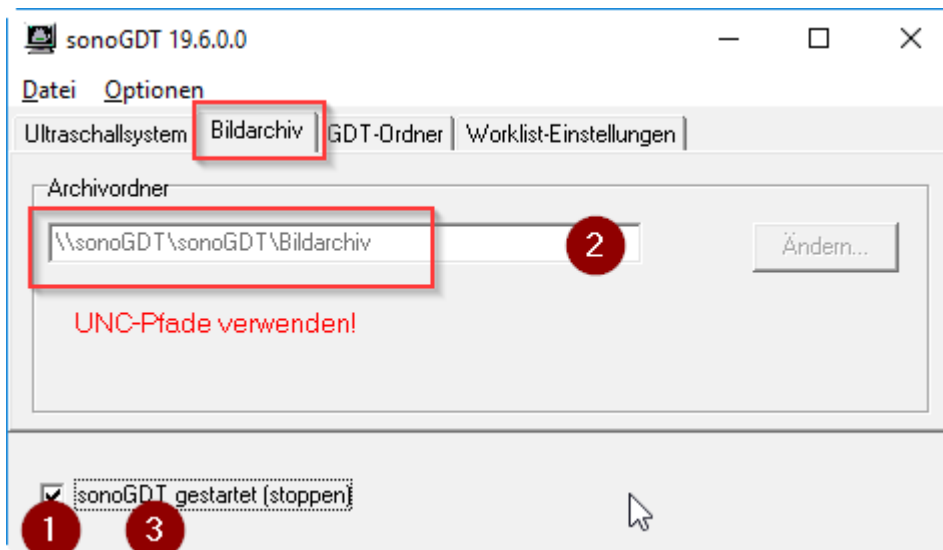

Kopieren Sie alle Dateien aus Ihrem bisherigen Bildarchiv-Ordner in diesen neuen hinein und benennen Sie anschließend den alten um, falls sie ihn zur Sicherheit noch nicht löschen wollen.

Installieren Sie sonoGDT wieder als Dienst:

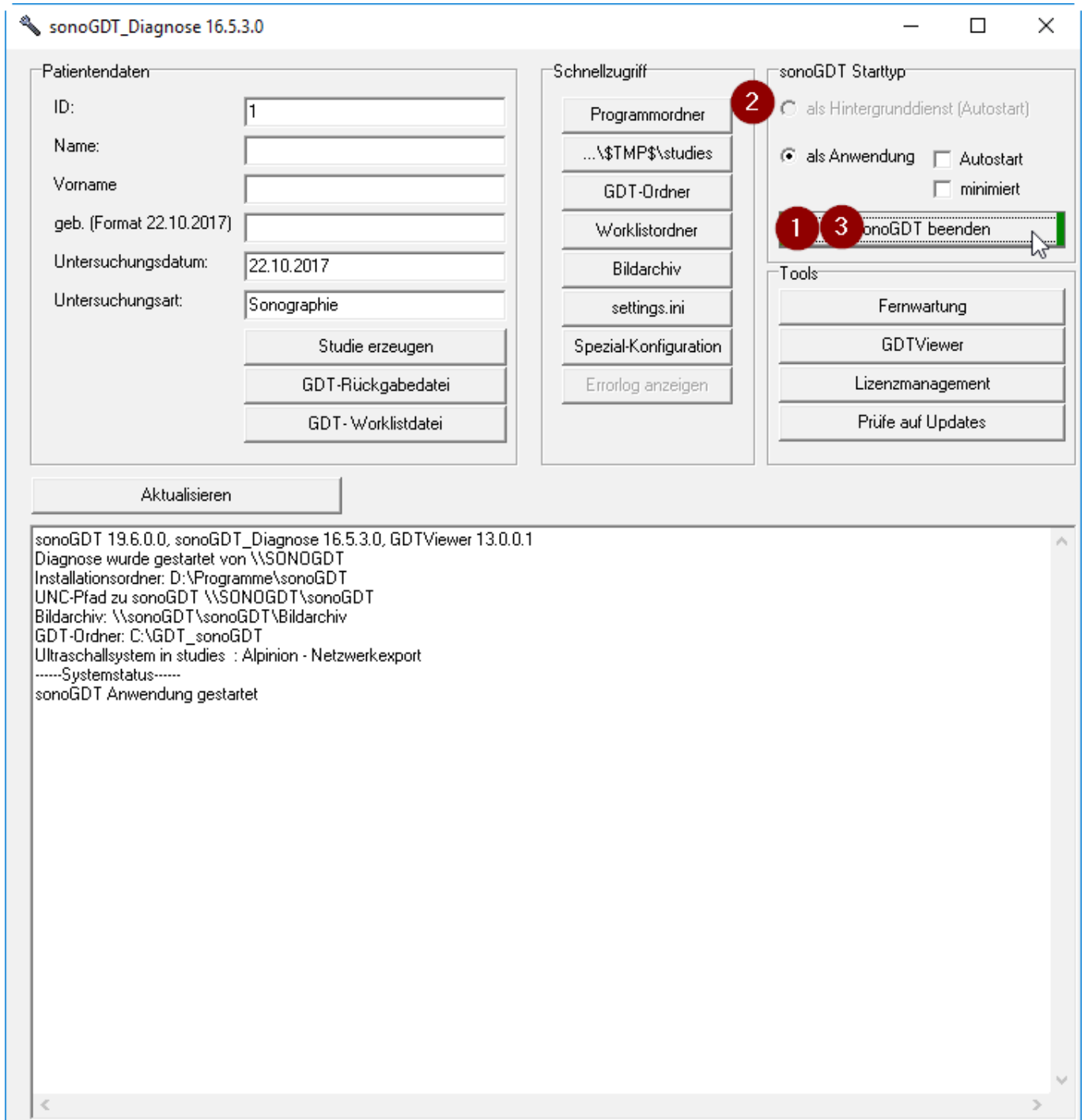

Prüfen Sie im Statusfenster, ob alle 3 Ordner beim automatischen Test erreicht wurden:

GDT-Ordner: OK

Bildarchiv-Ordner: OK

Studien-Ordner: OK

Falls nicht, fehlen auf dem Ziellaufwerk die Berechtigungen für den Systemdienst. Abhilfe schafft die Anleitung unter diesem Link:

[http://sonogdt.de/Files/Dienst\\_sonoGDT\\_in\\_anderem\\_Nutzerkontext\\_starten.pdf](http://sonogdt.de/Files/Dienst_sonoGDT_in_anderem_Nutzerkontext_starten.pdf)