

Anleitung zur Einrichtung von sonoGDT für doctorly

Folgen Sie der Anleitung zur Installation von sonoGDT auf dem Server-PC. Im Rahmen der Installation wird das Installationsverzeichnis mit dem Namen **sonoGDT** freigegeben, so dass es nun jeder Benutzer unter [\\Servername\sonoGDT](#) erreicht.

Starten Sie **sonoGDT_Diagnose**, klicken Sie dort auf **Spezial-Konfiguration**, wählen Sie auf dem Tabellenreiter **Praxissoftware** doctorly aus der Liste und klicken Sie auf Schnellkonfiguration.

Nehmen Sie an jedem Arbeitsplatz, an dem sonoGDT verwendet werden soll, folgende Einstellungen vor:

- Legen Sie einen Ordner **C:\GDT** an, falls er noch nicht existiert
- Klicken Sie in doctorly oben rechts auf den Kreis mit Ihren Initialen, schalten Sie im Menü **doctorly-connect** ein.
- Wählen Sie im gleichen Menü **Einstellungen**, anschließend unten im mittleren Bildschirmbereich **doctorlyConnect** und legen Sie einen neuen Eintrag mit folgenden Einstellungen an:

Beschreibung: **sonoGDT-Worklist_AP1** (wenn der Arbeitsplatz AP1 ist)
GDT 2.1
Export Dateiname: **sonoedv1** (ohne Endung!)
Standard
Verzeichnis: **C:\GDT**
Batch-Befehl: **"\\[Servername]\sonoGDT\showworklist.exe"** (mit Hochkommas!)

Wiederholen Sie dies für die Anzeige der Bilder mit diesen Einstellungen:

Beschreibung: **sonoGDT-Anzeige_AP1** (AP1 wäre die Bezeichnung des Arbeitsplatzes)
GDT 2.1
Export Dateiname: **viewedv1** (ohne Endung!)
Standard
Verzeichnis: **C:\sonoGDT\GDT**
Batch-Befehl: **"\\[Servername]\sonoGDT\GDTViewer.exe"** (mit Hochkommas)

Speichern Sie die Einstellungen.

Workflow:

Öffnen Sie Ihren Patienten, klicken Sie oben rechts auf Details, anschließend im 3-Punkte-Menü neben dem Patientennamen auf GDT-Export und dort entweder auf sonoGDT-Worklist oder sonoGDT-Anzeige.